



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Material-ID	100033
Hersteller	Ivoclar Vivadent
Beschreibung	Reserve
Material Name	IPS Empress Estehtic

		Prozesse					Starten					Halten					Pressen				
Programmnummer	Name	Freigeschaltet	Rate [°/min]	Temperatur [°]	Haltezeit [s]	Vakuu	Freigeschaltet	Rate [°/min]	Temperatur [°]	Haltezeit [s]	Vakuu	Freigeschaltet	Rate [°/min]	Temperatur [°]	Haltezeit [s]	Vakuu					
		1	IPS Empress Estehtic 100g (2016)	x		700			x	60	1075	1200	x	x		1075	300	x			
2	IPS Empress Estehtic 200g (2016)	x		700			x	60	1075	1200	x	x		1075	300	x					

Material-ID	100033
Manufacturer	Ivoclar Vivadent
Description	Reserve
Material name	IPS Empress Estehtic

		Processes					Starting					Holding					Pressing				
Program number	Name	Enable	Rate [°/min]	Temperature [°]	Hold time [s]	Vacuum	Enable	Rate [°/min]	Temperature [°]	Hold time [s]	Vacuum	Enable	Rate [°/min]	Temperature [°]	Hold time [s]	Vacuum					
		1	IPS Empress Estehtic 100g (2016)	x		700			x	60	1075	1200	x	x		1075	300	x			
2	IPS Empress Estehtic 200g (2016)	x		700			x	60	1075	1200	x	x		1075	300	x					