


初始加热建议


型号	预热时间	最终温度	保温时间	加热元件说明	保温说明
VL 01/12 LB (Press)	预设除湿程序	-	-	-	保温层裂纹不影响功能
LHT 01/16 Turbo Fire	5小时	1500℃	5小时	变形不影响功能	
LHT ../17 LB Speed	5小时	1550℃	5小时		
LHT ../17 D	5小时	1550℃	5小时		
LHTCT ../16	5小时	1400℃	2小时	-	
LCA 04/13 LB	6小时	1200℃	1小时	起泡是自然现象，无需修正	
L(T) ../11	7小时	1050℃	1小时	-	
LE ../11	7小时	1000℃	1小时	-	



初始加热后的变形不会影响其功能

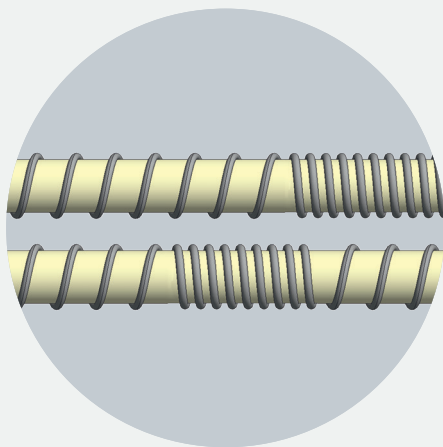

加热丝线圈收缩是自然过程，无需干预

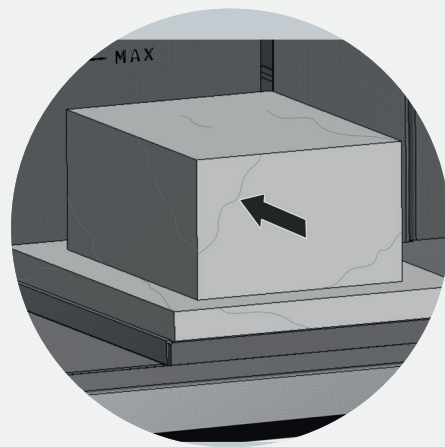

保温层开裂不会影响其功能



有关设备安装和调试的详细信息，请参阅炉子的相应操作手册：
<https://nabertherm.com/cn/xiazai/caozuoshuoming>