


# Raccomandazioni per il primo riscaldamento


Modello	Tempo di riscaldamento	Temperatura finale	Tempo di sosta	Avvertenze elementi riscaldanti	Avvertenze isolamento
VL 01/12 LB (Press)	Programma di deumidificazione preimpostato	-	-	-	Le incrinature nell'isolamento non influiscono sulla funzionalità
LHT 01/16 Turbo Fire	5 ore	1500 °C	5 ore	Eventuali deformazioni non influiscono sulla funzionalità	
LHT ../17 LB Speed	5 ore	1550 °C	5 ore		
LHT ../17 D	5 ore	1550 °C	5 ore		
LHTCT ../16	5 ore	1400 °C	2 ore	-	
LCA 04/13 LB	6 ore	1200 °C	1 ora	La distribuzione irregolare delle spire negli elementi riscaldanti è naturale e non richiede interventi	
L(T) ../11	7 ore	1050 °C	1 ora	-	
LE ../11	7 ore	1000 °C	1 ora	-	



Eventuali deformazioni dopo il primo riscaldamento non influiscono sulla funzionalità

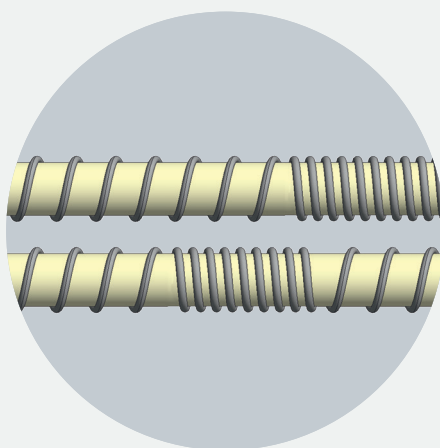

Eventuali distribuzioni irregolari delle spire dopo il primo riscaldamento non influiscono sulla funzionalità

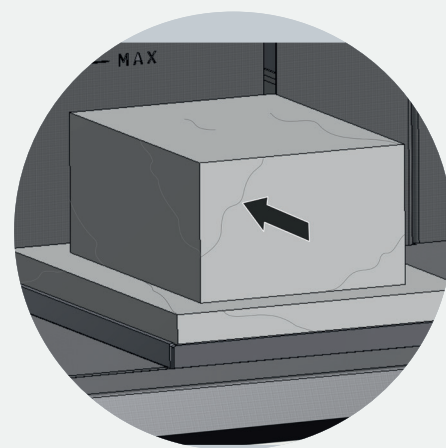

Le incrinature nell'isolamento non influiscono sulla funzionalità



**Per informazioni più dettagliate sull'installazione e la messa in funzione consultare le istruzioni per l'uso relative al forno**

<https://nabertherm.com/it/downloads/istruzioni-luso>